
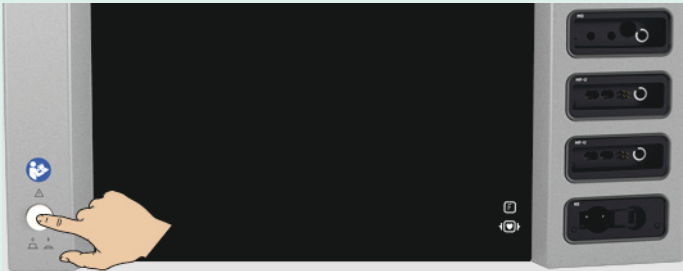


INSTRUCCIONES RESUMIDAS VIO® 3


 Las instrucciones resumidas no sustituyen a la instrucción ni al manual de instrucciones. Las instrucciones resumidas no contienen indicaciones de seguridad. Familiarícese con las indicaciones de seguridad en los manuales de instrucciones.

Pasos de mando necesarios


1 Encender el aparato



2 Seleccionar un programa

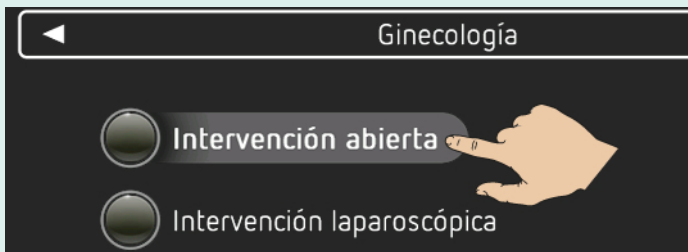

3 Aplicar y conectar el electrodo neutro

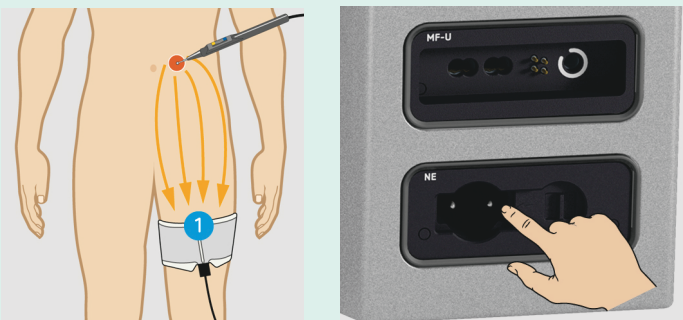

El borde largo del electrodo neutro (1) debe estar dirigido hacia el campo quirúrgico.

4 Vigilar el electrodo




Si el símbolo del electrodo neutro aparece en rojo, compruebe si

- el electrodo neutro está correctamente conectado al aparato.
- el borde largo del electrodo neutro está dirigido hacia el campo quirúrgico.
- el electrodo neutro tiene suficiente contacto con la piel.

5 Conexión de un instrumento



1. Toque el símbolo del instrumento.

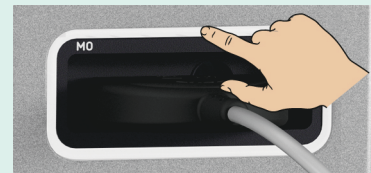


2. Inserte el instrumento en el conector que presente el marco del conector pulsátil.

6 Comprobar los ajustes del instrumento




7 Abrir la botella de argón para las aplicaciones de APC

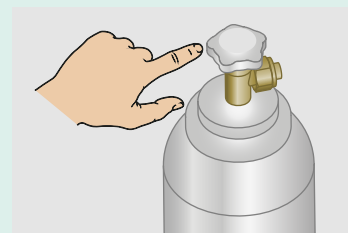

Pasos de mando opcionales

8 Cambiar el modo

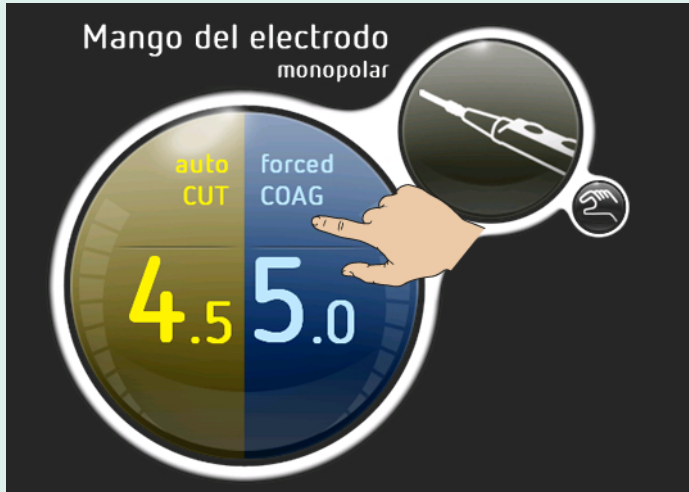

10 Asignación del interruptor de pedal, AUTO START, AUTO STOP



9 Cambiar el efecto

