

INSTRUCCIONES RESUMIDAS ERBEJET® 2




Las instrucciones resumidas no sustituyen a la instrucción, al manual de instrucciones ni a las indicaciones de uso. Las instrucciones resumidas no contienen indicaciones de seguridad. Familiarícese con las indicaciones de seguridad en los manuales de instrucciones y en las indicaciones de uso.

En todos los instrumentos:

1 Encender el ERBEJET 2

- Encienda el ERBEJET 2.

2 Seleccionar un programa

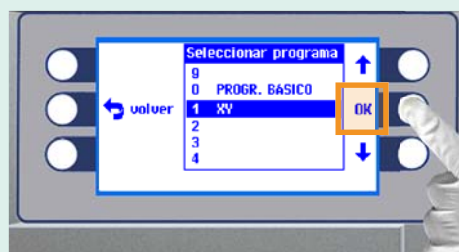

1. Seleccione con las teclas de selección ↑↓ un programa para su aplicación.
2. Confirme con la tecla de selección OK.

3 Conectar el conector del tubo del fluido a la unidad de bomba



- Conecte el conector del tubo del fluido a la unidad de bomba. El conector debe encajar de manera audible.

Nota: En las intervenciones quirúrgicas estériles, la conexión debe hacerse en la zona estéril.

4 Introducir la unidad de bomba



1. Espere hasta que se indique en el ERBEJET 2 ¡Inserte una nueva bomba!
2. Introduzca la unidad de bomba en el alojamiento de la bomba. La unidad de bomba debe encajar de forma audible.

Solo en el caso de HybridKnife, la sonda HybridAPC y el aplicador monopolar:


5 Seleccionar un programa en el VIO

1. Encienda el VIO.
2. Seleccione un programa para su aplicación.

6 Conectar el electrodo neutro


- Conecte el electrodo neutro al VIO.

7 Conectar el HybridKnife o el aplicador monopolar al VIO

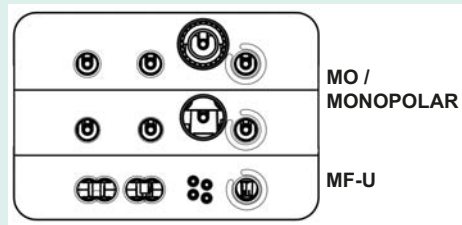

- Conecte el enchufe de AF a un conector hembra adecuado (véase arriba).

8 Conectar la sonda HybridAPC al APC

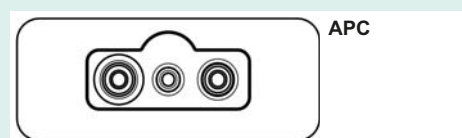

- Inserte el conector FiAPC en el conector hembra APC.

En todos los instrumentos:

9 Conectar el medio de corte a la unidad de bomba



1. Conecte un equipo de infusión a una botella o a una bolsa con el medio de corte. El medio de corte es una solución salina fisiológica estéril.
2. Cuelgue la botella o la bolsa.

Nota: Cuelgue la botella o la bolsa como máximo 1 m por encima del riel normalizado. El punto más bajo para colgar la botella o la bolsa es la altura del riel normalizado.

3. Abra la pinza de rueda.
4. Llene el tubo de infusión hasta que esté completamente purgado.
5. Quite la tapa protectora de la unidad de bomba.



6. Conecte la unidad de bomba y el tubo de infusión.

10 Llenar la unidad de bomba



1. Espere hasta que se indique en el ERBEJET 2 *Llenar*.
2. Pulse la tecla de selección *START*.
3. Compruebe si la manguera de succión de la unidad de bomba se llena con el medio de corte. El llenado tarda hasta 20 segundos.
4. Prueba de funcionamiento: Active el interruptor de pedal hasta que el medio de corte salga por la punta del instrumento.

11 Indicar el medio de corte gastado

Requisito indispensable: La opción está activada (realizable por un empleado de Erber).

1. Pulse la tecla de selección que se encuentra junto a la opción de menú *Programa/Configuración*.
2. Pulse la tecla de selección que se encuentra junto a la opción de menú *Info*.

12 Reducir las obstrucciones

Nota: Activando el ERBEJET 2 con frecuencia podrá reducir las posibles obstrucciones del instrumento (p. ej. en el HybridKnife).

13 Cambiar el instrumento



La unidad de bomba está prevista para el tratamiento de un paciente. Durante el tratamiento de dicho paciente, usted puede cambiar el instrumento tantas veces como desee.

- Para soltar el instrumento apriete el desbloqueo.

Nota: Utilice técnicas asépticas cuando cambie el instrumento.

14 Retirar la unidad de bomba

Antes de apagar el aparato:

1. Pulse *EJECT* para retirar la unidad de bomba. Siga las instrucciones de la pantalla.
2. Retire la unidad de bomba.

Secuencia operativa para el ESM 2, solo con el aplicador y el aplicador monopolar:

15 Encender el ESM 2



- Encienda el ESM 2.

16 Conectar el filtro de membrana a la manguera de vacío



- Conecte la manguera de vacío con el filtro de membrana.

Observación: Debe utilizarse un filtro de membrana nuevo en los siguientes casos: Para cada nueva aplicación. Si hace más de 7 días que el filtro de membrana se sacó del envase. Si el filtro de membrana ha absorbido humedad.

17 Conectar la manguera de vacío



18 Insertar la bolsa de aspiración



19 Insertar la manguera de succión en el del tarro de succión



1. Enchufe el adaptador en la conexión para la manguera de succión.
2. Inserte la manguera de succión del aplicador en el adaptador.

20 Cambiar el modo de succión

